


1. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии людей, животных, живых растений в помещении.
2. Тщательно закрыть двери помещения и принять меры к недопущению людей в помещение в течение сеанса облучения. Вывесить табличку «Не входить! Опасно! Идёт обеззараживание УФ-излучением».

Общий вид облучателя

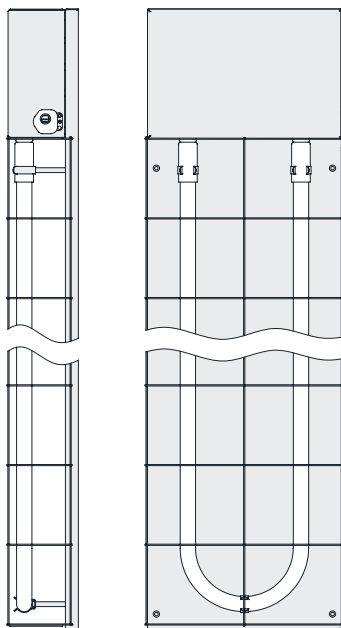

3. Включить облучатель. В процессе работы облучателя входить в помещение категорически запрещается.
4. Для визуального контроля работы облучателя рекомендуется, чтобы в двери либо стене облучаемого помещения имелось окно с силикатным (обычным оконным) стеклом.
ОРГСТЕКЛО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (пропускает УФ-излучение)!
5. По истечении времени работы выключить облучатель.

Время работы для достижения эффективности 99,9% по ОМЧ		
Объём помещения	Радиус обработки	Время обработки помещений
до 25 м ³	до 2,4 м	17 минут
26-30 м ³	до 3 м	20 минут
31-50 м ³	до 4 м	30 минут

Более подробная инструкция в паспорте на облучатель.