





1. Установить облучатель в центре помещения, **защитный чехол должен быть снят**.
2. Убедиться, что сетевой выключатель находится в положении «выключено».

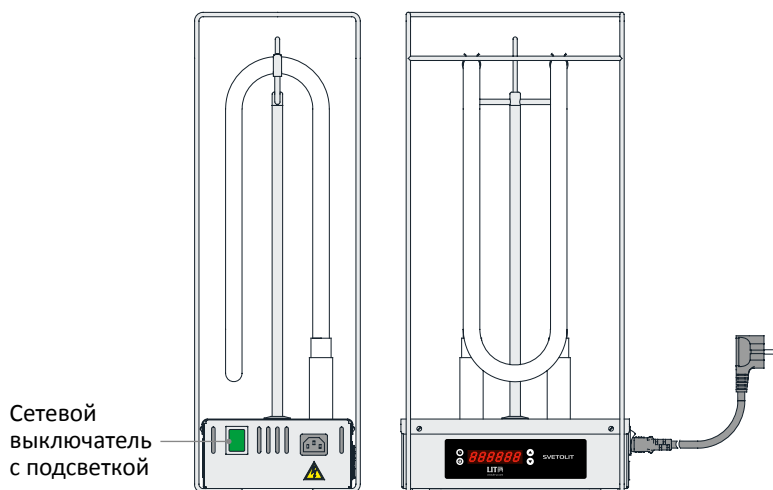
Панель управления





Шестизначный цифровой дисплей

-  Включение УФ лампы
-  Увеличение времени облучения
-  Уменьшение времени облучения
-  Время наработки

Общий вид облучателя




Сетевой выключатель с подсветкой

3. Подключить кабель питания в штыревой разъём на корпусе облучателя, вставить вилку кабеля в розетку.
4. Включить сетевой выключатель. При этом должна засветиться его подсветка. На табло облучателя отобразится последнее установленное время работы.
5. Перед включением УФ-лампы необходимо выбрать время облучения и установить его на табло облучателя кнопками  и .

Время работы для достижения эффективности 99,9% по ОМЧ

СВЕТОЛИТ-50			СВЕТОЛИТ-100		
Объём помещения	Радиус обработки	Время обработки помещений	Объём помещения	Радиус обработки	Время обработки помещений
до 25 м ³	до 1,2 м	15 минут	до 25 м ³	до 1,2 м	8 минут
26-30 м ³	до 1,5 м	18 минут	26-50 м ³	до 2 м	16 минут
31-50 м ³	до 2 м	29 минут	51-75 м ³	до 2,5 м	23 минуты

6. Включение УФ-лампы производится нажатием кнопки . После включения начинается обратный отсчет интервала времени 24 секунды, сопровождаемый звуковым сигналом – в течение этого времени необходимо покинуть помещение. После окончания звукового сигнала произойдёт включение УФ-лампы облучателя. К моменту окончания звукового сигнала в помещении не должно быть людей и животных, входная дверь закрыта и приняты меры к недопущению людей в помещение в течение сеанса облучения. Вывесить табличку «Не входить! Опасно! Идёт обеззараживание УФ-излучением».
7. По окончании установленного времени работы УФ-установка выключится и прозвучат 5 коротких звуковых сигналов; на цифровом табло отобразятся символы окончания облучения « - - - - - ».
8. По окончании сеанса облучения выключить сетевой выключатель. При этом должна погаснуть его подсветка, затем вынуть вилку из розетки.
9. Переместить облучатель в следующее помещение либо на место хранения.

Более подробная инструкция в паспорте на облучатель.